


immunoCHECK

Impfen Ja, aber mit Verstand!

Vielen Dank, dass Sie sich für immunoCHECK entschieden haben; zum Wohle Ihres Tieres. Lassen Sie von Ihrem Tierarzt eine Blutprobe Ihres Tieres entnehmen und wir sagen Ihnen, ob Ihr Tier genug Antikörper hat, um auf eine erneute Impfung verzichten zu können: dank modernstem Testverfahren!

Schnell, präzise und unkompliziert:

1. Lassen Sie von Ihrem Tierarzt eine Blutprobe Ihres Tieres entnehmen und schicken uns das beiliegende Blutprobe-Röhrchen zur Analyse ein.
2. Füllen Sie die untenstehende abziehbare Etikette mit leserlicher Schrift aus (Kugelschreiber oder wasserfester Filzstift) und kleben Sie die Etikette auf das Blutprobe-Röhrchen.
3. Legen Sie das Blutprobe-Röhrchen in die Vertiefung der
4. Füllen Sie das untenstehende Formular aus. Trennen Sie das Formular ab und legen Sie es in den Deckel der Verpackung.
5. Kleben Sie die vorfrankierte Rücksende-Etikette auf die Verpackung.
6. Schliessen Sie die Verpackung und kleben Sie den Deckel zu.
7. Werfen Sie das Päckli in einen Briefkasten der Schweizerischen

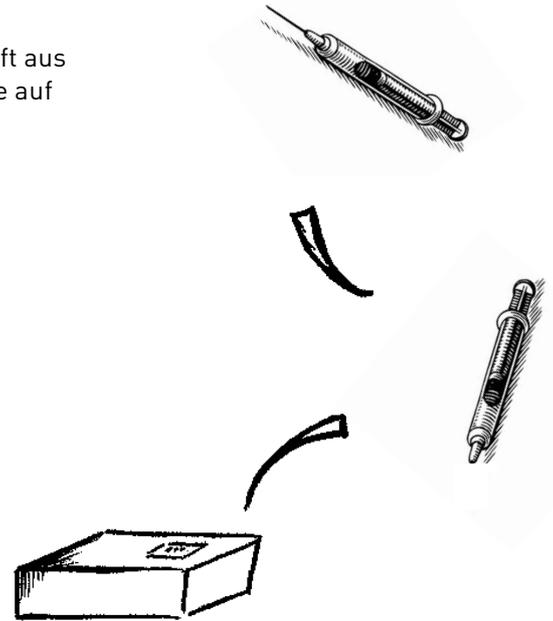

In wenigen Tagen erhalten Sie elektronische Post von uns!

Nach Eingang der Blutprobe, erhalten Sie das Ergebnis der Analyse innerhalb von 3 Arbeitstagen. Falls nicht, bitten wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen: 062 211 00 00 / info@microstech.com



Angaben zum Tier

Bitte füllen Sie das Formular **vollständig** aus. Das Formular muss **zwingend** mit der Probe zurückgesandt werden. Personen- und Tierdaten werden vertraulich behandelt. Auf Wunsch werden die Resultate per E-Mail an den Tierarzt weitergeleitet.

Tier

Name: _____

Art: _____

Geschlecht: _____

Besitzer

Name / Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

Röhrchen-Etikette

Tierarzt

Name / Vorname: _____

Praxis: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

Name:

Geb. Dat.:

Name Tier:

Tierart: